

# coproplus ultra

> A EVOLUÇÃO DO EXAME  
**Parasitológico  
Inteligente**



ÚNICO COM  
Dupla **FILTRAGEM  
BLINDADA**



- ✓ Sedimento ainda mais limpo
- ✓ Redução de tempo do exame
- ✓ Análise direta ao microscópio
- ✓ Metodologia rápida, prática e higiênica
- ✓ Qualidade e confiança nos resultados
- ✓ Dupla Filtragem Blindada



Escaneie o QRCode e **fale  
diretamente com nosso  
atendimento!**

\* Disponível nas versões: Coproplus Ultra 5, SAF e ECO.

CERTIFIED QUALITY SYSTEM



FM702891



[www.nldiagnostica.com.br](http://www.nldiagnostica.com.br)


**NL**  
DIAGNÓSTICA

IVD Trusted Solutions since 1985




## Procedimento de Coleta Passo-a-Passo

### 1º PASSO:

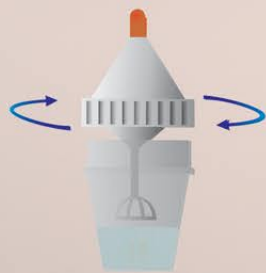


Abrir o frasco cuidadosamente para não derramar o conteúdo e mantê-lo sempre em pé.

### 2º PASSO:

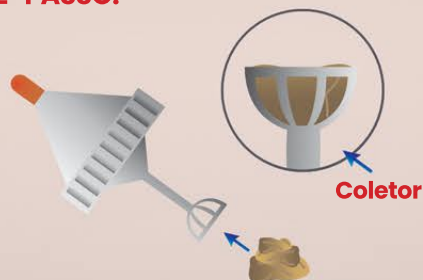

Utilizando a haste interna do produto, colher a amostra de fezes e encher o coletor. Não colocar mais do que o coletor comporta. Se estiver com diarreia, colocar uma quantidade equivalente diretamente no frasco. Para coletas múltiplas, repetir este passo mais duas vezes em dias alternados.


### 3º PASSO:

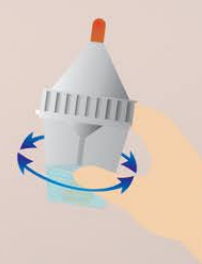

Fechar o frasco com cuidado e enviá-lo ao laboratório.


## Procedimento de Análise Passo-a-Passo

### 1º PASSO:

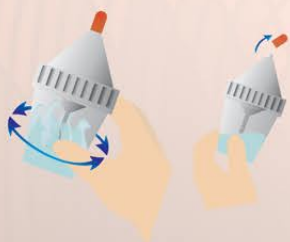

Ao receber a amostra, agitar o frasco em movimentos circulares até a dissolução.

### 2º PASSO:

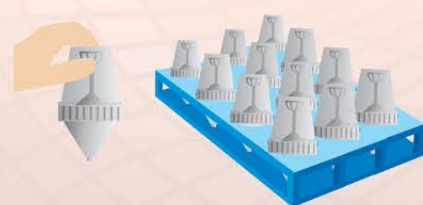

Remover o cap de vedação e pressionar o frasco levemente para a saída de ar. Inverter o frasco e colocá-lo na bandeja de sedimentação por 15 minutos.

### 3º PASSO:



Gotejar na lâmina de vidro, adicionar Lugol ou outro corante e examinar ao microscópio.

## Vantagens

- Área de filtragem ideal
- Dupla filtragem blindada
- Amostra x Líquido proporcionais
- Sedimento ainda mais limpo
- Otimiza espaço e rotina
- Economiza mão de obra
- Conserva a amostra por 30 dias sem refrigeração
- Elimina o mau odor da amostra
- Biossegurança
- Preserva o meio ambiente
- Tradição NL Diagnóstica

## Bandeja de Sedimentação

Lavável, que Preserva o Meio Ambiente.



Cat #	Product	Shelf Life
NL.CPU.F5	Coproplus Ultra 5	24M
NL.CPU.SAF	Coproplus Ultra SAF	24M
NL.CPU.ECO	Coproplus Ultra ECO	24M
NL.CPUTRAY	Coproplus Ultra Tray	N/A (not applicable)

CERTIFIED QUALITY SYSTEM



FM702891



NL Comércio Exterior Ltda - Phone. +55 11 5060 4700  
R. Vigário Albemaz, 367 / 371 - São Paulo - SP - Brasil - CEP: 04134-020  
[www.nldiagnostica.com.br](http://www.nldiagnostica.com.br) - [comercial.nl@nldiagnostica.com.br](mailto:comercial.nl@nldiagnostica.com.br)

**NL**  
DIAGNÓSTICA

IVD Trusted Solutions since 1985