RIOQUÍMICA		
Indústria Farmacêutica	FT0003 - 001	
Revisão: 04/07/ 22 Vigência: 04/07/22	Cloro Rio 1%	
Elaborador (a)	Robson Rondini Pesquisa e Desenvolvimento	
Aprovador (a)	Daniel Gonçalves Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento	
Homologador (a)	Iuri Visquetto Gerente SGQ	

Cópia Não Controlada

1. CATEGORIA: DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO.

2. FINALIDADE:

O CLORO RIO 1%[®] é um desinfetante hospitalar de nível intermediário. Sua fórmula contém hipoclorito de sódio com 1% de cloro ativo estabilizado, que atua como elemento oxidativo em cadeias proteicas de microrganismos. Indicado para a desinfecção de superfícies fixas em ambiente hospitalar, bem como para a desinfecção de artigos para inaloterapia e oxigenoterapia. Ideal para desinfecção de hospitais e casas de saúde, ambulatórios, consultórios odontológicos, clínicas e postos de saúde. Pode ser aplicado em pisos, paredes, mobílias e artigos não críticos em geral.

3. MODO DE USAR:

Superfícies fixas: Aplicar o produto na diluição de 0,5%, ou seja, 5.000 ppm (1 litro do produto para 1 litro de água), no tempo de contato de 5 minutos. Enxaguar se necessário.

Para artigos não críticos: Lavar os artigos, enxaguar e secar. Imergi-los na solução de 0,5%, ou seja, 5.000 ppm (1 litro do produto para 1 litro de água), deixando em contato por 5 minutos. Após esse tempo retirar os artigos, enxaguar e secar. Utilizar o mais rápido possível.

Artigos para Inaloterapia: lavar, enxaguar e secar os artigos. Imergi-los no produto na forma pura (10.000 ppm) no tempo de contato de 30 minutos, enxaguar e secar os artigos. Utilizá-los o mais breve possível.

4. EFICÁCIA BACTERICIDA:

MICRORGANISMO	METODOLOGIA	TEMPO DE CONTATO (Minutos)	REDUÇÃO (%)
Staphylococcus aureus	AOAC:2005 955.12	5	>99,999
Salmonella choleraesuis	AOAC:2005 955.14	5	>99,999
Pseudomonas aeruginosa	AOAC:2005 964.02	5	>99,999
Helicobacter pilori	EN 1276:2009	10	>99,999
Escheria coli	INCQS N° 653210007	10	>99,999

RIOQUÍMICA	FICHA TECNICA	
RIOQUÍMICA Indústria Farmacêutica	FT0003 - 001	
Revisão: 04/07/22 Vigência: 04/07/22	Cloro Rio 1%	

Cópia Não Controlada

5. EFICÁCIA MICOBACTERICIDA (ATIVIDADE TUBERCOLOCIDA):

MICRORGANISMO	METODOLOGIA	TEMPO DE CONTATO (Minutos)	CRESCIMENTO
Mycobacterium bovis	AOAC METHOD 965.12	30	AUSENTE
Mycobacterium smegmatis	AOAC METHOD 965.12	30	AUSENTE

6. EFICÁCIA FUNGICIDA:

MICRORGANISMO	METODOLOGIA	TEMPO DE CONTATO (Minutos)	CRESCIMENTO
Trichophyton mentagrophytes	AOAC METHOD 955.17	10	AUSENTE
Candida albicans	EN 14562	10	AUSENTE

7. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:

Não misturar com outros produtos.

Não ingerir.

Não aplicar sobre pessoas, alimentos e animais.

Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens. Usar equipamentos de proteção adequados, tais como luvas, máscaras, óculos de proteção e avental. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS

8. LIMITAÇÕES DE USO:

O produto em sua forma de apresentação não é compatível com cobalto, níquel, cádmio, ferro, cobre, bronze e respectivas ligas. Não utilizar com materiais incompatíveis. O produto deve ser aplicado em ambientes ventilados, não sendo indicado para locais com pouca ventilação.

9. PRIMEIROS SOCORROS:

Em caso de contato com olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou rótulo do produto.

Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou rótulo do produto.

Em caso de inalação ou aspiração, remova a pessoa para local arejado e se houver sinais de intoxicação chame socorro médico.

Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS. A MISTURA COM ÁCIDOS OU PRODUTOS À BASE DE AMÔNIA PRODUZ GASES TÓXICOS.

10. COMPOSIÇÃO:

Hipoclorito de sódio, estabilizante e água.

PRINCÍPIO ATIVO: Hipoclorito de Sódio – Cloro ativo 1% p/p (10.000 ppm).

11. CONSERVAÇÃO:

Conservar o produto em temperatura ambiente (15-30°C). Manter o produto em local seco e ventilado, afastado da luz solar direta, fontes de calor, materiais incompatíveis, combustíveis e gases comprimidos.

RIOQUÍMICA	FICHA TECNICA
RIOQUÍMICA Indústria Farmacêutica	FT0003 - 001
Revisão: 04/07/22 Vigência: 04/07/22	Cloro Rio 1%

Cópia Não Controlada

12. REGISTRO

REGISTRO NO MS N° 3.1329.0374

ANVISA:

13. VALIDADE: 12 meses a partir da data de fabricação.

14. APRESENTAÇÕES 1 L **COMERCIALIZADAS:** 5 L

15. VERSÃO: VE012019

16. ANEXOS / REGISTROS

Código do Anexo	Descrição do Anexo	Local de Guarda	Tempo de Guarda
Anexo 1	Rótulo do produto	Arquivo eletrônico no sistema Protheus.	Não aplicável.

17. HISTÓRICO DE REVISÃO 000- Criação do documento. 001- Revisão por vencimento