

 <b>RIOQUÍMICA</b> Indústria Farmacêutica	<b>FICHA TECNICA</b>	
	<b>FT0002 - 001</b>	
Revisão: <b>30/06/22</b> Vigência: 30/06/22	<b>Riozyme IV e Neutro</b>	
<b>Elaborador (a)</b>	Robson Rondini Pesquisa e Desenvolvimento	
<b>Aprovador (a)</b>	Daniel Gonçalves Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento	
<b>Homologador (a)</b>	Iuri Visquetto Gerente SGQ	

**Cópia Não Controlada**

**1. CATEGORIA:** DETERGENTE ENZIMÁTICO.

**2. FINALIDADE:** O **RIOZYME IV®** e **NEUTRO** é um detergente enzimático que possui 4 enzimas que atuam na redução de matéria orgânica nos artigos em 5 minutos. Sua formulação exclusiva contém tensoativos que associados às enzimas resultam em maior eficiência na limpeza. O **RIOZYME IV®** e **NEUTRO** é indicado para limpeza manual e automatizada de instrumentos médico hospitalares, odontológicos e laboratórios. Dissolve com facilidade a matéria orgânica sendo, portanto, eficaz em sua remoção e limpeza de endoscópios, fibroscópios e canulados.

**3. RENDIMENTO** 1 litro do **RIOZYME IV®** e **NEUTRO** rende 1.001 litros de solução enzimática.

**4. MODO DE USAR:** **Limpeza Manual:** Diluir o **RIOZYME IV®** e **NEUTRO** na proporção de 1 mL do produto para cada 1 litro de água. A temperatura da água para ter maior eficácia do produto deve estar de 40°C a 55°C, deixar agir por 5 minutos. Na sequência enxaguar com água em abundância.

**Limpeza Automatizada:** No equipamento diluir o **RIOZYME IV®** e **NEUTRO** na proporção de 1 mL do produto para cada 1 litro de água. A temperatura da água para ter maior eficácia do produto deve estar de 40°C a 55°C, deixar agir por 5 minutos, seguindo juntamente as instruções do fabricante do equipamento. Na sequência enxaguar com água em abundância.

**Para limpeza em temperatura ambiente:** O tempo de imersão do material com o produto deve ser validado conforme o protocolo interno de limpeza do hospital, para garantir a eficácia de limpeza do produto.

**UTILIZAR IMEDIATAMENTE APÓS O PREPARO. A REUTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE LIMPEZA PODE PROVOCAR PERDA DA EFICIÊNCIA.**

O produto pode ser utilizado em água potável, desmineralizada ou deionizada.

**PH DA ÁGUA:** 6,0 a 9,5.

**DUREZA:** 0ppm a 350ppm.

**CONDUTIBILIDADE:** 0,0000055 ms/cm a 200 ms/cm.



**Cópia Não Controlada**

**5. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:**

Não misturar o **RIOZYME IV®** e **NEUTRO** com agentes oxidantes ou iodo (PVPI), pois pode causar uma perda de eficácia do produto.

Não misturar com outros produtos.

Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilize a embalagem vazia.

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos ou com a pele.

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS**

**6. PRIMEIROS SOCORROS:**

Em caso de contato com olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou rótulo do produto.

Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou rótulo do produto.

Em caso de inalação ou aspiração, remova a pessoa para local arejado e se houver sinais de intoxicação chame socorro médico.

Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente

**7. CONSERVAÇÃO:**

Conservar em temperatura ambiente (15-30°C).

**8. COMPOSIÇÃO:**

Amilase, lipase, protease, carbohidrase, álcool isopropílico, agente de controle de ph, conservantes, tensoativo não iônico, coadjuvantes, estabilizantes, aditivos e água. Atividade amilolítica mínima: 0,02 ua.ml-1.min.-1; Atividade proteolítica mínima: 0,12 up.ml-1.min.-1.

**TEOR DE TENSOATIVO:** Mistura de alquilglicosídeo e alquil álcool etoxilado (3,5%). PH PURO: 7,0.

**9. REGISTRO ANVISA:** REGISTRO NO MS Nº 3.1329.0380

**10. VALIDADE:** 24 meses a partir da data de fabricação.

**11. APRESENTAÇÕES COMERCIALIZADAS:** 500 mL  
1 L  
5 L

**12. ANEXOS / REGISTROS**

<b>Código do Anexo</b>	<b>Descrição do Anexo</b>	<b>Local de Guarda</b>	<b>Tempo de Guarda</b>
Anexo 1	Rótulo do produto	Arquivo eletrônico no sistema Protheus.	Não aplicável.



**RIOQUÍMICA**  
Indústria Farmacêutica

**FICHA TECNICA**

***FT0002 - 001***

Revisão: 30/06/22

Vigência: 30/06/22

**Riozyme IV e Neutro**

**Cópia Não Controlada**

**13. HISTÓRICO DE REVISÃO**

000- Criação do Documento.

001- Revisão por vencimento da vigência